

BIOSANIT SR

Désinfectant hydro-alcoolique pour les surfaces alimentaires sans rinçage



CARACTERISTIQUES PHYSIQUES:

Etat : liquide limpide

Odeur: alcool

Couleur: incolore

pH: 5-7

Point éclair : 23°C

BIOSANIT SR est un désinfectant hydro-alcoolique prêt à l'emploi à large spectre d'action. Formule conforme au référentiel Ecocert. Produit « contact alimentaire » sans rinçage.

Domaines d'application:

Produit réservé à un usage professionnel

TP2 Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires

Utilisé pour la désinfection des surfaces, équipements et mobiliers propres. Ne laisse pas de traces. Le produit peut être utilisé pour la désinfection rapide du petit mobilier, chariots, surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et petites surfaces proches du malade.

BIOSANIT SR s'utilise sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, trancheurs, hachoirs, couteaux ...).

Il peut être également utilisé sur les jouets pour une désinfection complète.

BIOATTITUDE

11 Bis Rue du Capitaine Georges Madon
- 51100 Reims

Téléphone : 03 26 89 50 19
Télécopie : 03 26 77 93 02
E-mail : info@bioattitude.com



UTILISATION DU BIOSANIT SR

Mode d'emploi :

Prêt à l'emploi. Pulvériser sur un linge à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.

Pulvériser sur les surfaces préalablement nettoyées à une distance de 20–30cm à raison de 30-40ml/m². laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

Compatibilité :

Ne pas utiliser sur le Plexiglass

Caoutchoucs et plastiques : compatible avec les matériaux qui résistent à l'éthanol

Sur les surfaces sensibles : procéder à un essai préalable sur un endroit peu visible

Conservation :

Stockage dans les flacons d'origine fermés, à température ambiante, à l'abri de la chaleur et du gel.

Eviter l'évaporation de l'alcool après ouverture en maintenant le flacon fermé.

Péremption : 3ans à partir de la date de fabrication

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande

Activité antimicrobienne :

Normes	Concentration	Temps
BACTERICIDE		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	100 %	5 min.
EN 1276 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
EN 13727+A2 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	80%	5 min.
EN 13697 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100 %	5 min.
FONGICIDE		
EN 1275 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 1650 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 (<i>C. albicans</i>)	80%	15 min.
EN 13624 (<i>Aspergillus brasiliensis</i>)	97%	15 min.
EN 13697 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
VIRUCIDE		
BVDV et Vaccinia virus	100 %	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (Inclus VRS), Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100 %	5 min.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Composition:

Substance active Ethanol (CAS N° 64-17-5 : 52.7%/m/m)

99.9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

Mentions de danger :

H226 : liquide et vapeurs inflammables

H319 : provoque une sévère irritation des yeux



Symbole de danger : ATTENTION

Transport: UN1170 (ETHANOL 52.7%), 3,III, (D/E)

Emballages : Flacon 500ml

Utiliser les biocides avec précautions

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Les renseignements contenus dans cette fiche technique sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est employé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Dans ce cas, consultez notre laboratoire. En aucun cas cette fiche ne peut être utilisée comme document contractuel.

BIOATTITUDE

11 Bis Rue du Capitaine Georges Madon -
51100 Reims

Téléphone : 03 26 89 50 19
Télécopie : 03 26 77 93 02

